



Długotrwała skuteczność materiału DermaSilk® wymaga przestrzegania zasad konserwacji

SPOSÓB PRANIA I KONSERWACJI

- Prać regularnie, gdyż zabrudzenia obniżają skuteczność działania bielizny.
- Prać ręcznie, bez użycia detergentów, wybielaczy ani płynów zmiękczających.
- Do wody dodać odrobinę szamponu (najlepiej dla dzieci).
- Po upraniu dokładnie wypłukać.
- Suszyć na płasko rozłożonym ręczniku.
- W celu utrzymania właściwej miękkości, co 10 prań pozostawić na 2-3 h w roztworze sody oczyszczonej: 2 łyżki stołowe sody / 1 liter letniej wody (ta sama metoda przy zabrudzeniach, woda może być wtedy cieplejsza).



Nie prać w pralce automatycznej.

Nie prać chemicznie. Nie suszyć w suszarce.

Prasować na najchłodniejszym ustawieniu, tylko jeśli konieczne. Prasowanie rozciąga bieliznę (można stosować po skurczeniu).

Zasady stosowania w przypadku korzystania z emolientów

1. Po kąpeli i delikatnym wytarciu ciała nałóż emolient, najlepiej w ciągu pierwszych 5 minut, tak aby **wilgoć z kąpeli** została w skórze.
2. Odczekaj, **aż emolient wchłonie się w skórę**. W przeciwnym razie, krem przejdzie na materiał osłabiając jego działanie.
3. Załóż DermaSilk. Bielizna noszona często i w optymalnych warunkach daje najlepsze efekty działania.

Życzymy zdrowia!